

MASQUE CHIRURGICAL NORME FRANCAISE ET EUROPEENE


Code : 820046

Conditionnement : boîte de 40

Prix 0.88€ ht unitaire soit 35.20 € ht la boîte

Tva 5.5%

DISPONIBLE

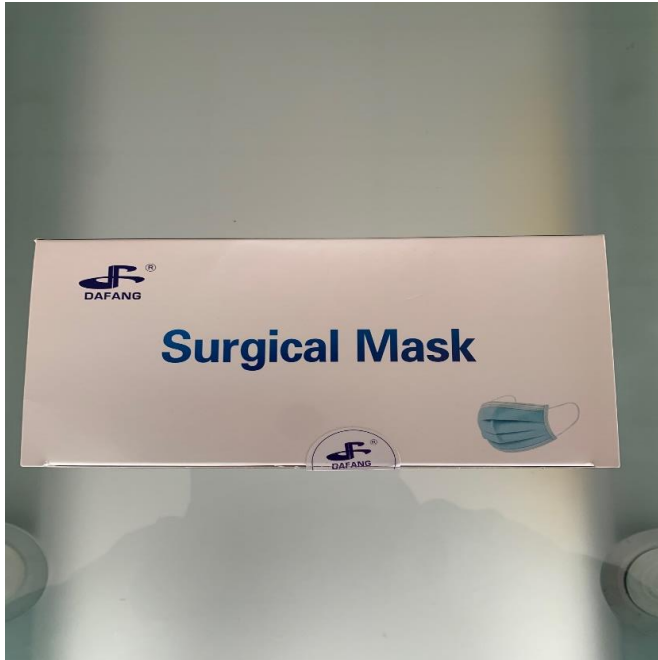



Masque Barrière Lavable avec barrette nasale

référence NO01927 MAS UNS

NOTICE D'UTILISATION

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

- Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes



1- Avant le premier usage, effectuez un lavage machine à 60°C, un séchage complet en séchoir et un repassage à température modérée.



5- Passer les élastiques derrière les oreilles. Le masque doit recouvrir correctement le nez, la bouche et le menton.




2- Lavez-vous soigneusement les mains au savon ou avec du gel hydroalcoolique avant de manipuler votre masque.



6- Ajuster le masque à l'aide de la **barrette nasale** au niveau du nez et des pommettes pour une bonne étanchéité.



3- Ecartez les bords du masque en le tenant par les élastiques.

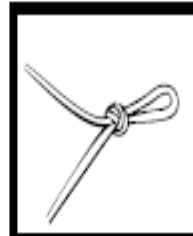

7- TAILLE UNIQUE - L
Pour adapter le masque à une taille S, nouer l'élastique.



4- Poser le masque sur le visage à l'aide des élastique et en respectant le sens de pose (l'étiquette tricolore se trouve côté extérieur et en haut du masque).



8- Après 4h d'utilisation maximum, retirer le masque en saisissant les brides élastiques et en prenant les précautions nécessaires pour éviter toute contamination.

VISIÈRE POLYCARBONATE SOUPLE ET LÈGÈRE AVEC SANGLE DE RÉGLAGE



CODE 820035

CONDITIONEMENT X 10

DISPONIBLE DE SUITE


Distributeur de gel hydroalcoolique pour les points de vente

- Hauteur de la colonne 110mm
- 1 Flacon de 500ml inclus dans l'offre
- Changement ou remplissage simple du flacon
- Niveau de gel visible sans démontage
- Commande à pédale pour éviter tout contact
- Pas de branchement électrique

Prix ht du modèle 225€ dispo semaine 21
Code : 820040



Haut de la borne

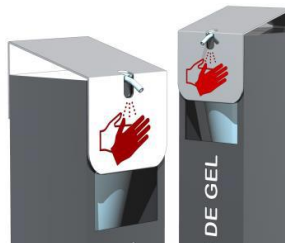

Pied de la borne

DESINFECTANT DE CONTACT PROBACTI +

Code 820036

Lot de 2 bouteilles avec 1 diffuseur

